

## KARTA PRODUKTU



Nazwa produktu

**MASECZKA z JONAMI SREBRA do użytku prywatnego**

Przeznaczenie

**Przeznaczona jest do użytku wielorazowego.  
Nie ogranicza swobody oddychania  
i zapewnia komfort oddychania.  
Nie daje gwarancji całkowitej ochrony przed zakażeniem.**

Kolor

**Biały**

Dzianina

**Poliester 100%, APERTURA JONAMI SREBRA SILVERPLUS,  
gramatura 200 g/m<sup>2</sup>**

**Dzianina z jonami srebra ma właściwości antybakteryjne,  
polegające na hamowaniu wzrostu bakterii.  
SILVERPLUS zapewnia higienę i świeżość**

Instrukcja  
użytkowania

**Wyrób zachowuje swoje właściwości do 25 cykli prania w  
warunkach domowych, w temp. do 40°C**

1. Zanim weźmiesz maskę oczyść ręce - mydłem i wodą, wilgotną chusteczką z alkoholem lub żelem dezynfekcyjnym.
2. Wyjmij maseczkę z opakowania.
3. Sprawdź, która strona jest stroną górną - strona z troczkami bez regulacji długości.
4. Upewnij się, że właściwa strona maski - gładka - skierowana jest do wewnątrz.
5. Umieść maskę na twarzy i załóż troczki na głowę - górny poprowadź nad uszami, dolny zawiąż z tyłu głowy.
6. Pociągnij dół maski, aby zakryła usta i podbródek.
7. Nie dotykaj przedniej powierzchni maseczki podczas jej użytkowania.
8. Przed zdjęciem maseczki koniecznie umyj ręce.
9. Zdejmij maseczkę, chwytając tylko za troczki.



- Wyrób prać oddzielnie w temp. 40°C oraz kilkakrotnie płukać. Prać regularnie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu.



- Nie czyścić w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych.